

Aan de slag met:



Flex-i-Trans System®



one system, endless possibilities

Aanpassingsbedrijf Bierman BV
Pesetaweg 16
2153 PJ NIEUW-VENNEP
0252-210611
www.biermanab.nl

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

1.



2.



3.



4.



1. Klap de hoofdsteun in.
2. Beweeg de armleuning naar boven en druk hem door naar achteren tot deze klikt en de rugleuning vrijkomt.
3. Klap de rugleuning in naar voren en druk deze in de vergrendeling.
4. Kantel het geheel richting de zijwand.

1b. Stoel uitvouwen

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

1.



2.



3.



4.



1. Kantel de zitting van de zijwand.
2. Beweeg de armleuning naar boven en druk deze door naar achteren tot hij klikt en de rugleuning vrijkomt.
3. Klap de rugleuning uit naar achteren tot de vergrendeling.
4. Klap de hoofdsteun uit.

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

1.



2.



3.



4.



1. *Belangrijk:* Verplaats de veiligheidspal richting de zijwand.
2. Beweeg de vergrendel handle naar boven.
3. Draai de complete handle naar buiten.
4. De snelsluiser is ontgrendeld; herhaal deze procedure ook voor de andere kant van de stoelpoot.

2b. Stoel vastmaken (snelsluiters)

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

1.



2.



3.



1. Pak de handle vast en druk deze naar beneden totdat de vertanding in de rail van de vloer aangrijpt, draai daarna de hendel naar achteren.
2. Druk de vergrendel-handle naar beneden tot hij horizontaal ligt.
3. Snelsluiters is vergrendeld; herhaal deze procedure ook voor de andere kant van de stoelpoot.

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

1.



2.



3.



4.



1. Druk voor vrijgave van het totale systeem op de aangegeven knop op het dashboard. De knoppen gemonteerd in de hemel van het passagiersgedeelte van de bus zijn nu te gebruiken.
2. Druk op de knop in de hemel die correspondeert met de rolstoelplaats waar u gaat werken. Hiermee ontgrendelt u de spanbanden *vóór* van de desbetreffende rolstoelplaats. Het lampje in de knop kleurt rood.
3. De indicatielampjes op het dashboard geven aan welke rolstoelplaats is ontgrendeld (rood).
4. Plaats de rolstoel centraal tussen de 4 spanbanden. En zet de rolstoel op de rem. Trek de spanbanden *vóór* uit de vloer en zoek naar de juiste aangrijpings-mogelijkheden. Fixeer beide spanbanden aan het juiste punt van de rolstoel. Wanneer nodig kunt u de rolstoel nog vrij positioneren tot deze juist staat opgesteld. Zet daarna de rolstoel weer op de rem!

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

5.



5. Druk opnieuw op de corresponderende knop in de hemel om de spanbanden *voor* te fixeren (zie stap 2). Het lampje in de knop gaat nu uit.

Nadat u de rolstoel aan de voorkant heeft vergrendeld, kunt u aan de achterkant van de rolstoel beginnen.

6.



6. Trek de spanband met een vloeiende beweging uit de vloer. De spanband blokkeert automatisch. U kunt de spanband ontgrendelen door de aangegeven knop in de vloer in te drukken. Door de rolstoel licht naar voren en achteren te bewegen spannen de banden aan.

De rolstoel is nu gefixeerd. Nu kunt u beginnen met de 2-pts/ 3-pts gordel voor de veiligheid van de persoon in de rolstoel.

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

1.



2.



3.




1. Haal het gordelslot uit de vloer en zet deze rechtop.
2. Neem de gordel in de hemel los.
3. Neem de 2 gordeltongen uit de vloer.

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

4.



5.

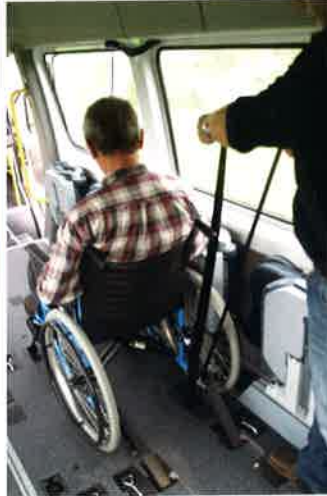

6.



7.



8.



4. Klik de achterste gordeltong in het gordelslot in de hemel.
Nu ontstaat een 3-pts. gordel zoals in een personenauto.
5. Neem zoveel mogelijk gordelband uit de vloer en sla deze om de persoon in de rolstoel.
6. Sluit de vrije gordeltong in het gordelslot welke uit de vloer steekt (stap 1).
7. Beweeg het gordelslot omhoog zodat deze op de heup van de persoon komt. De schoudergordel hoort over het middenrif, vrij van de hals, de schouder te verlaten. Verplaats eventueel het heuppunt zodanig dat de gordel juist verloopt.
8. Druk opnieuw op de aangegeven knop om het totaalsysteem te vergrendelen.

Aan de slag met: Flex-i-Trans System[®]

1.



2.



3.



Belangrijk: Voordat u begint met losmaken van de spanbanden dient u te controleren dat de rolstoel op de rem staat!

1. Druk de ontgrendelingsknop achter de rolstoel in de vloer "in", zoals aangegeven. De spanband ontgrendelt zich en kan worden losgemaakt van de rolstoel.
2. Druk de knop in de hemel in; de spanbanden *voor* ontgrendelen zich.
3. Maak de spanbanden *voor* los van de rolstoel en plaats ze terug in de vloer. De rolstoel is nu vrij verplaatsbaar en kan uit het voertuig worden gereden.

Aan de slag met: **Flex-i-Trans System**[®]

Met onderstaande tips blijft uw Flex-i-Trans System FiT:

1. Stofzuig de vloer regelmatig, gebruik voor de bakjes en de rails een smal mondstuk
2. De gordelbanden afnemen met een droge doek
3. Wanneer nodig de vloer afnemen met een natte, handwarme dweil en een niet agressief reinigingsmiddel

Let op:

1. Reinigingsmiddelen zoals cockpitspray of groene zeep kunnen de antislipwerking van de vloerbedekking negatief beïnvloeden.
2. Gebruik geen agressieve chemische middelen, deze kunnen het Flex-i-Trans Systeem aantasten.