



Gebruikshandleiding

Rolstoelauto Basic (t/m 2008)

IN DE AUTO:

- Open de achterportieren/klep
- Laat de inrijplaat zakken (ontgrendel eventueel het slot)
- Ontgrendel de voorgordels met de rode knop (het rode lampje gaat aan)
- Haak de voorgordels zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
- *Indien lier aanwezig: Haak de lier aan de rolstoel vast (in het midden onder de zitting)*
- Vergrendel de voorgordels met de rode knop (het rode lampje gaat uit). De rolstoel kan nu niet meer terug rollen
- Duw / rij de rolstoel in de auto. *Indien lier aanwezig: trek de rolstoel met de lier de auto in*
- Trek de rolstoel stevig naar achter en controleer of de voorgordels goed zijn opgerold
- Haak de achtergordels zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
- Vergrendel de sluiting van de achtergordels
- Doe de gordel om bij de rolstoelpassagier
- Sluit de inrijplaat van de auto (vergrendel eventueel het slot)
- Sluit de achterportieren/klep

UIT DE AUTO:

- Open de achterportieren/klep
- Laat de inrijplaat zakken (ontgrendel eventueel het slot)
- Maak de gordel los bij de rolstoelpassagier
- Ontgrendel de achtergordels en leg deze opzij / in het midden van de vloer
- Ontgrendel de voorgordel met de rode knop (het rode lampje gaat aan)
- Duw / rij de rolstoel +/- 5 cm naar voren. *Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier*
LET OP: De rolstoel staat nu vrij en rijdt direct achteruit!
- Trek / rij de rolstoel achteruit. *Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier*
- Maak de voorgordels los
- Schakel de rode ontgrendelingsknop uit (het rode lampje gaat uit)
- *Indien lier aanwezig: Maak de lier los en leg de deze terug in de auto*
- Sluit de inrijplaat van de auto (vergrendel eventueel het slot)
- Sluit de achterportieren/klep