



Gebruikshandleiding

Rolstoelauto met luchtgeveerd knielsysteem (Renault Tech – 2009 tot 2019)

IN DE AUTO:

- Contact aan & handrem aangetrokken!
- Open de achterklep
- Laat de auto zakken met behulp van de afstandsbediening achterin de auto (met kruisnoer)
 - Knop pijl omlaag (kort indrukken, niet ingedrukt houden!)
 - De inrijplaat zakt automatisch (ga niet op de inrijdplaat staan)
- Ontgrendel de voorgordels met de rechter / groene knop met het rolstoel symbool
- Haak de voorgordels zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
- *Indien lier aanwezig: Haak de lier aan de rolstoel vast (in het midden onder de zitting)*
- Vergrendel de voorgordels met de linker / rode knop. (tot het blauwe lampje in de auto gaat branden, daarna loslaten / niet ingedrukt houden!)
 - De rolstoel kan nu niet meer terug rollen
- Duw / rij de rolstoel in de auto. *Indien lier aanwezig: trek de rolstoel met de lier de auto in*
- Trek de rolstoel stevig naar achter en controleer of de voorgordels goed zijn opgerold
- Monteer de achtergordels op de vloer
- Ontgrendel de achtergordels (door de rode pen in te drukken) en haak deze zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
- Draai de achtergordels stevig aan met de draaiknop op het gordelhuis
- Klik de korte gordel (met gordel-insteek) aan het palletje van het rechter gordelhuis
- Klik de lange gordel aan het palletje van het linker gordelhuis
- Doe de driepuntsgordel om bij de rolstoelpassagier
- Laat de auto omhoog gaan met behulp van de afstandsbediening
 - Knop pijl omhoog
 - De inrijplaat zakt automatisch (ga niet op de inrijdplaat staan)
- Sluit de achterklep





Gebruikshandleiding

Rolstoelauto met luchtgeveerd knielsysteem (Renault Tech – 2009 tot 2019)

UIT DE AUTO:

- Contact aan & handrem aangetrokken!
- Open de achterklep
- Laat de auto zakken met behulp van de afstandsbediening achterin de auto (met kruisnoer)
 - Knop pijl omlaag
 - De inrijplaat zakt automatisch (ga niet op de inrijplaat staan)
- Maak de driepuntsgordel los bij de rolstoelpassagier
- Druk de rode pen van de achtergordels in en haak de gordels los van de rolstoel
- Maak de achtergordels los van de vloer (Q'Strain-logo omhoogtrekken en de gehele gordel los schuiven). Leg de gordels opzij.
- Ontgrendel de voorgordels met de rechter / groene knop met het rolstoel symbool
- Duw / rij de rolstoel +/- 5 cm naar voren. *Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier.*
LET OP: De rolstoel staat nu vrij en rijdt direct achteruit!
- Trek / rij de rolstoel achteruit. *Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier*
- Maak de voorgordels los
- Vergrendel de voorgordels met de linker / rode knop.
- *Indien lier aanwezig: Maak de lier los en leg de deze terug in de auto*
- Laat de auto omhoog gaan met behulp van de afstandsbediening
 - Knop pijl omhoog
 - De inrijplaat zakt automatisch (ga niet op de inrijplaat staan)
- Sluit de achterklep

