



## **Gebruikshandleiding**

Rolstoelauto met luchtgeveerd knielsysteem (vanaf 2009)

### **IN DE AUTO:**

- **Contact aan (motor uit) & handrem aangetrokken!**
- **Open de achterklep**
- **Laat de auto zakken met behulp van de GROENE knop (tot de auto niet meer verder zakt)**
- **Laat de inrijplaat zakken (ontgrendel eventueel het slot)**
- **Ontgrendel de voorgordels met de RODE knop (het rode lampje gaat aan).**
- **Haak de voorgordels zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast**
- *Indien lier aanwezig: Haak de lier aan de rolstoel vast (in het midden onder de zitting)*
- **Vergrendel de voorgordels met de RODE knop (het rode lampje gaat uit). De rolstoel kan nu niet meer terug rollen**
- **Duw / rij de rolstoel in de auto. Indien lier aanwezig: trek de rolstoel met de lier de auto in**
- **Trek de rolstoel stevig naar achter en controleer of de voorgordels goed zijn opgerold**
- **Monteer de achtergordels op de vloer**
- **Ontgrendel de achtergordels (door de rode pen in te drukken) en haak deze zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast**
- **Draai de achtergordels stevig aan met de draaiknop op het gordelhuis**
- **Klik de korte gordel (met gordel-insteek) aan het palletje van het linker gordelhuis**
- **Klik de lange gordel aan het palletje van het rechter gordelhuis (indien nodig!)**
- **Doe de driepuntsgordel om bij de rolstoelpassagier**
- **Sluit de inrijplaat (vergrendel eventueel het slot)**
- **Sluit de achterklep**
- **Start de auto en wacht met rijden tot de auto weer op rijniveau is gekomen**



## **Gebruikshandleiding**

Rolstoelauto met luchtgeveerd knielsysteem (vanaf 2009)

### UIT DE AUTO:

- Contact aan (motor uit) & handrem aangetrokken!
- Open de achterklep
- Laat de auto zakken met behulp van de **GROENE** knop (tot de auto niet meer verder zakt)
- Laat de inrijplaat zakken (ontgrendel eventueel het slot)
- Maak de driepuntsgordel los bij de rolstoelpassagier
- Druk de rode pen van de achtergordels in en haak de gordels los van de rolstoel
- Maak de achtergordels los van de vloer (Q'Strait-logo omhoogtrekken en de gehele gordel los schuiven). Leg de gordels opzij.
- Ontgrendel de voorgordel met de **RODE** knop (het rode lampje gaat aan)
- Duw / rij de rolstoel +/- 5 cm naar voren. *Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier.*  
**LET OP: De rolstoel staat nu vrij en rijdt direct achteruit!**
- Trek / rij de rolstoel achteruit. *Indien lier aanwezig: maak gebruik van de lier*
- Maak de voorgordels los
- Schakel de **RODE** ontgrendelingsknop uit (het rode lampje gaat uit)
- *Indien lier aanwezig: Maak de lier los en leg de deze terug in de auto*
- Sluit de inrijplaat (vergrendel eventueel het slot)
- Laat de auto omhoog komen met de **GROENE** knop
- Sluit de achterklep