



Gebbruikshandleiding

Rolstoelbus Elektrisch ontgrendelbare voorgordels

IN DE BUS:

- Open de achterklep
- Laat de lift zakken
- Duw / rij de rolstoel in de bus.
- Ontgrendel de voorgordels met de rode knop (het rode lampje gaat aan)
- Haak de voorgordels (door de rode pen in te drukken) zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
- Trek de rolstoel stevig naar achter en controleer of de voorgordels goed vast staan
- Monteer de achtergordels op de vloer
- Ontgrendel de achtergordels (door de rode pen in te drukken) en haak deze zo hoog mogelijk onder het zitoppervlak van de rolstoel vast
- Draai de achtergordels stevig aan met de draaiknop op het gordelhuis
- Klik de korte gordel (met gordel-insteek) aan het palletje van het linker gordelhuis
- Klik de lange gordel aan het palletje van het rechter gordelhuis (indien nodig!)
- Doe de driepuntsgordel om bij de rolstoelpassagier
- Sluit de lift
- Sluit de achterklep

UIT DE BUS:

- Open de achterklep
- Laat de lift zakken
- Maak de driepuntsgordel los bij de rolstoelpassagier
- Ontgrendel de achtergordels en leg deze opzij / in het midden van de vloer
- Ontgrendel de voorgordel met de rode knop (het rode lampje gaat aan)
- Duw / rij de rolstoel +/- 5 cm naar voren.
LET OP: De rolstoel staat nu vrij en rijdt direct achteruit!
- Druk de rode pen van de achtergordels in en haak de gordels los van de rolstoel
- Maak de achtergordels los van de vloer (Q'Strain-logo omhoogtrekken en de gehele gordel los schuiven). Leg de gordels opzij.
- Druk de rode pen van de voorgordels in en haak de gordels los van de rolstoel
- LET OP: De rolstoel staat nu vrij en kan achteruitgereden worden!
- Trek / rij de rolstoel achteruit.
- Sluit de lift
- Sluit de achterklep