




GEBRUIKERSHANDLEIDING ROLSTOELVERGREDELING

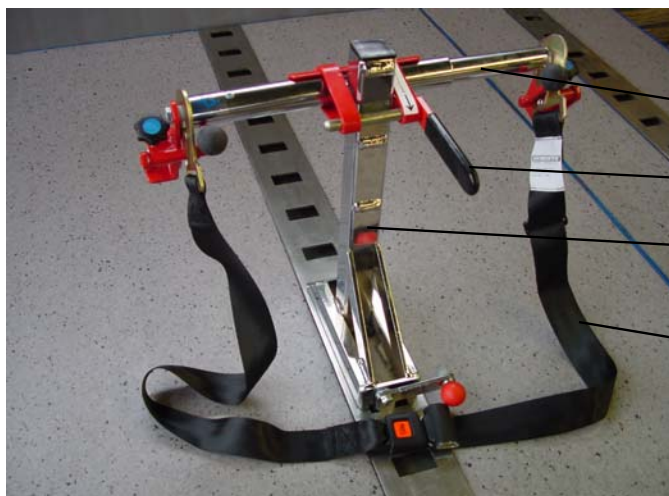

tussensteun

knevelpen

delta steun

aanklipgordel

Bediening rolstoelvergrendeling:

- Duw de tussensteun in en bevestig de tussensteun aan de rolstoel .
- bevestig de meegeleverde aanklipgordel aan tussensteun en stel deze af op de rolstoel gebruiker.
- Haal de delta steun uit de rail en rij de rolstoel naar binnen.
- Plaats de delta steun weer in de rail,achter de rolstoel ligt.
- Plaats de rolstoel zodanig dat de tussensteun tegen de delta steun, en beweeg de vergrendel hendel naar beneden tot de hendel horizontaal komt.
- Steek de kevelpen van rechts naar links in het knevelstuk, platte kant naar voren. (til hierbij het knevelstuk iets omhoog).
- Beweeg de knevelpen naar beneden tot deze klemvast zit.

De rolstoel staat nu met de delta steun veilig aan de wagenvloer gekoppeld.



Gebruik combi - bek: (buisdiameter tot 28mm)

- Plaats de tussen steun tussen de stoelframe of aan paset..
- Beweeg de vergrendelhendel naar boven zodat de bek afgesloten word.
- Door middel van het aandraaien van de draai-knop, kan de bek op de dikte van de frame buis afgesteld worden.



Gebruik standaard bek (buisdiameter tot 22mm):

- Plaats de tussen steun tussen de stoelframe of aan paset.
- Beweeg de vergrendelhendel naar boven zodat de bek afgesloten word.



Voor het opmeten van het bereik van de tussensteun dient u het volgende te doen:

Meet de afstand tussen de buizen aan de achterzijde van de rolstoel en de diameter van de frame buizen.

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V.
Pesetaweg 16
2153 PJ Nieuw-Vennep
Telefoon: 0252-210611
Fax: 0252-232985

E-mail: info@biermanab.nl
Website: www.biermanab.nl

 **AANPASSINGSBEDRIJF**
Bierman

Versie: 08-12-05

