

# FiT System Pro 4

## TOUCHSCREEN



## Gebruikershandleiding

**00821700/1**

06-06-2018

## De rolstoel vastzetten (systeem zonder FIT®-hemelbaan)

### Rolstoel vastzetten

1. Druk op de knop met het busje in het FIT® controle paneel om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven. De FIT® vloer is nu vrijgegeven en klaar om te bedienen.



2. Open vooraf de rolstoelplaatsen waar een passagier geplaatst zal worden.



3. Plaats de rolstoel op één van de beschikbare rolstoelplaatsen en vraag de passagier de rolstoel op de rem te zetten.



4. Bevestig als eerste de spanbanden met haak op de aangegeven bevestigingspunten van de rolstoel (herkenbaar aan het haak symbool).



**Het aanbrengen van de driepuntsgordel**

- 5. Gebruik de gordelzuil die vlak achter de rolstoel staat. Beweeg, voor de correcte positie van de driepuntsgordel, de FiT® gordelzuil naar binnen (positie rolstoelplaats).




- 6. Neem de driepuntsgordel uit de FiT® gordelzuil en breng de gordel aan.

**De gordel hoort over het middenrif en de bekken, vrij van de hals, de schouder te verlaten.**

- 7. Houd de driepuntsgordel met één hand op heuphoogte; neem met de andere hand het gordelslot uit de vloer en sluit de gordel op heuphoogte tegen het lichaam (niet over het wiel!)



- 8. De rolstoelplaats zal automatisch vergrendelen zodra de gordelhouder opgepakt wordt om de gordel mee te bevestigen. Indien dit niet direct gebeurt (doordat de gordelhouder eerder is bevestigd dan de haken) dan vergrendeld het systeem alsnog automatisch na circa 15 seconden. Mocht het nodig zijn om de rolstoelplaats handmatig te vergrendelen dan kan dit uiteraard ook nog altijd via het FiT® controle paneel.

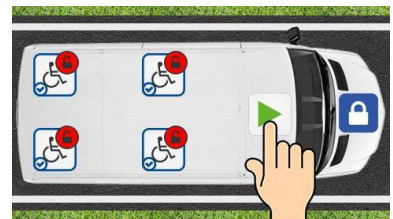

- 9. Deactiveer, voordat u gaat rijden, het rolstoelvastzetsysteem door op de blauwe knop met het slot te drukken. De rode LED op het FiT® controle paneel gaat uit en als alles vergrendeld en veilig is, zal er een groene LED aangaan. Door het deactiveren is het rolstoelvastzetsysteem niet bedienbaar onder het rijden. U kunt nu veilig gaan rijden.




## De rolstoel losmaken (systeem zonder FiT® hemelbaan)

### Losmaken van de rolstoel

1. Druk op de knop met het busje in het FiT® controle paneel om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven. De FiT® vloer is nu vrijgegeven en klaar om te bedienen.



2. Controleer of de rolstoel op de rem staat. Selecteer op het scherm de rolstoelplaatsen die ontgrendelt moeten worden en druk op de 'Start' knop.

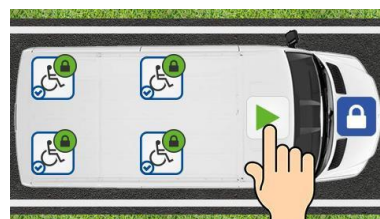

3. Maak de FiT® veiligheidsgordel los. Berg het gordelslot op in de vloer en de driepuntsgordel in de FiT® gordelzuil.



4. Beweeg de FiT® gordelzuil in verticale positie (positie zitplaats).



5. Verwijder de spanbanden van de rolstoel en berg ze op in de desbetreffende FiT® retractor units.

6. Selecteer de rolstoelplaatsen die afgedekt kunnen worden op het FiT® controle paneel en druk op 'Start' om de retractor units dicht te maken.



## De rolstoel vastzetten (systeem met FiT® hemelbaan)

### Rolstoel vastzetten

1. Druk op de knop met het busje in het FiT® controle paneel om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven. De knoppen in de FiT® hemelbaan zijn nu te gebruiken.



2. Plaats de rolstoel op één van de beschikbare rolstoelplaatsen en vraag de passagier de rolstoel op de rem te zetten.



3. Druk op de knop in de FiT® hemelbaan die correspondeert met de rolstoelplaats. De FiT® retractor units openen zich en de vier spanbanden en het gordelslot worden aangereikt en aangelicht. De indicatie led in de knop van de FiT® hemelbaan en op het FiT® controle paneel kleuren rood.



4. Bevestig als eerste de spanbanden met haak op de aangegeven bevestigingspunten van de rolstoel (herkenbaar aan het haak symbool).



### Het aanbrengen van de driepuntsgordel

5. Gebruik de gordelzuil die vlak achter de rolstoel staat. Beweeg, voor de correcte positie van de driepuntsgordel, de FiT® gordelzuil naar binnen (positie rolstoelplaats).



6. Neem de driepuntsgordel uit de FiT® gordelzuil en breng de gordel aan.

**De gordel hoort over het middenrif en de bekken, vrij van de hals, de schouder te verlaten.**

7. Houd de driepuntsgordel met één hand op heuphoogte; neem met de andere hand het gordelslot uit de vloer en sluit de gordel op heuphoogte tegen het lichaam (niet over het wiel!)



8. De rolstoelplaats zal automatisch vergrendelen zodra de gordelhouder opgepakt wordt om de gordel mee te bevestigen. Indien dit niet direct gebeurt (doordat de gordelhouder eerder is bevestigd dan de haken) dan vergrendeld het systeem alsnog automatisch na circa 15 seconden. Mocht het nodig zijn om de rolstoelplaats handmatig te vergrendelen dan kan dit uiteraard ook nog altijd via de corresponderende knop in de FiT® hemelbaan óf via het FiT® controle paneel. Zodra alle corresponderende spanbanden vergrendeld zijn zal de indicatie led in de knop groen kleuren (veilig).



9. Deactiveer, voordat u gaat rijden, het rolstoelvastzetsysteem door op de blauwe knop met het slot te drukken. De rode LED op het FiT® controle paneel gaat uit en als alles vergrendeld en veilig is, zal er een groene LED aangaan. Door het deactiveren is het rolstoelvastzetsysteem niet bedienbaar onder het rijden. U kunt nu veilig gaan rijden.



## De rolstoel losmaken (systeem met FiT®-hemelbaan)

### Losmaken van de rolstoel

1. Druk op de knop met het busje in het FiT® controle paneel om het rolstoelvastzetsysteem vrij te geven.
2. Controleer of de rolstoel op de rem staat en druk vervolgens op de knop in de FiT® hemelbaan (indicatie led kleurt rood) om de corresponderende spanbanden te ontgrendelen.
3. Maak de FiT® veiligheidsgordel los. Berg het gordelslot op in de vloer en de driepuntsgordel in de FiT® gordelzuil.
4. Beweeg de FiT® gordelzuil in verticale positie (positie zitplaats).
5. Verwijder de spanbanden van de rolstoel en berg ze op in de desbetreffende FiT® retractor units.
6. Druk op de knop in de FiT® hemelbaan en de spanbanden en het gordelslot worden automatisch afgedekt. Zodra deze volledig gesloten zijn zal de indicatie led in de knop groen kleuren.



### **Algemene aanwijzingen**

Het kan gebeuren dat er onverhoopt, bij het sluiten van de vloer, iets tussen één van de deksels van de Fit® retractor units komt. De retractor zal zijn beweging stoppen. Probeer de belemmering te verwijderen. Indien dit lukt, druk dan opnieuw op de 'Start' knop om de retractor units te sluiten. Indien het niet lukt de belemmering te verwijderen, druk dan op het rode kruis\*. Hiermee worden de bewegingen van de retractor units omgedraaid. Haal de belemmering weg en druk vervolgens nogmaals op 'Start' voor de corresponderende rolstoelplaats om de vloer weer te sluiten. Indien bovenstaande niet helpt kan het zijn dat de belemmering zich aan de binnenzijde bevindt. Neem dan contact op met een gecertificeerde monteur.



\* Als het rode kruis niet zichtbaar is, druk dan nogmaals op 'Start' om de knop te activeren.